

# SECUR TRACH


Sistema per  
la tracheotomia  
percutanea  
"in sicurezza"




**Medical Service**  
forniture ospedaliere

# SECUR TRACH

Con Secur-Trach la tracheotomia percutanea viene eseguita in assoluta sicurezza e con notevole semplicità. L'intubazione realizzata con Secur-Trach consente, oltre ad una ventilazione ottimale, di reperire, senza errori, il punto in cui inserire l'ago guida in trachea, data la presenza della luce a L.E.D. che consente una adeguata transilluminazione. Orientando l'ago guida verso il fascio di luce si potrà inserire lo stesso in trachea in assoluta sicurezza, in quanto la parete posteriore della trachea sarà protetta dalla particolare punta a "paletta" del tubo. Non ci sarà modo di trovare ostacolo alla introduzione di un filo guida e dei successivi eventuali dilatatori. In tal modo non sarà possibile (né per l'ago né per i sistemi di dilatazione usati) danneggiare la mucosa tracheale, né la cuffia del Secur-Trach, né sarà mai necessario ritirare lo stesso per l'introduzione della cannula tracheotomica.

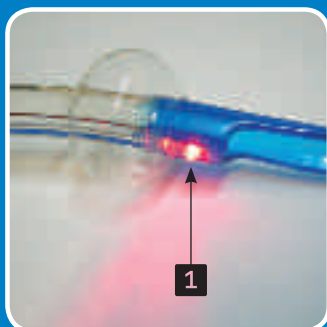

**1** LUCE A L.E.D. PER TRANSILLUMINAZIONE  
Facilita l'individuazione del punto di reperi per l'introduzione dell'ago guida.

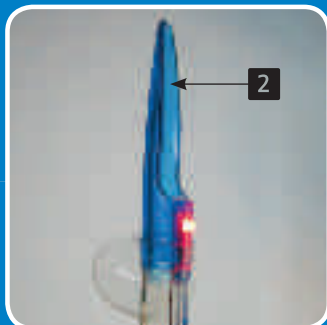

**2** "PALETTA" DI SICUREZZA  
Evita che l'ago introduttore ed i vari tipi di sistemi dilatativi possano ledere la parete posteriore della trachea, evitando gravi complicanze (ad esempio la fistola tracheo-esofagea).



Tutta la procedura viene eseguita con una VENTILAZIONE CONVENZIONALE non essendo necessario il riposizionamento del tubo endotracheale.

CE 0051

Può essere utilizzato con tutti i sistemi di tracheotomia percutanea dilatativa.

**SECUR-TRACH È COPERTO DA BREVETTO INTERNAZIONALE**

ARTICOLO	CODICE
Cannula da 7mm con palloncino normale	DPST 0107
Cannula da 8mm con palloncino normale	DPST 0108
Cannula da 9mm con palloncino normale	DPST 0109
Cannula da 7mm con palloncino decentrato	DPST 0207
Cannula da 8mm con palloncino decentrato	DPST 0208
Cannula da 9mm con palloncino decentrato	DPST 0209

Distribuito da:

REV. 01/2009

**Medical Service**  
forniture ospedaliere

Via T. Caruto, 9 (Z.I.) 84131 Salerno (Italia)  
Tel. +39-089-7724085 - Fax +39-089-303942 - e-mail: info@medserv.it